



Dispositivo DLX VPS Rhythm™ con ecografía

Colocación de PICC para quienes **no les gustan las sorpresas**


Dispositivo DLX Arrow™ VPS Rhythm™ con ecografía

Visualización para una colocación selectiva

Una adecuada evaluación del vaso es esencial para garantizar el éxito de la inserción del PICC, así como la comodidad y seguridad del paciente. Para conseguirlo, necesita una ecografía clara para planificar la inserción y guiar la aguja. El dispositivo DLX VPS Rhythm™ con ecografía integrada está diseñado para ser una herramienta de evaluación vascular clara y fácil de usar.

El modo de Ecografía del dispositivo DLX VPS Rhythm™ permite al usuario¹:


- Congelar o descongelar la imagen
- Tomar una foto instantánea
- Obtener mediciones tanto del diámetro como del área con la herramienta de relación catéter-vaso (CVR)
- Visualizar indicadores cualitativos del flujo y la dirección de los fluidos con el modo de mapeo del flujo en color
- Utilizar un soporte opcional para la guía de la aguja
- Utilizar los botones de congelación y foto instantánea directamente en la sonda

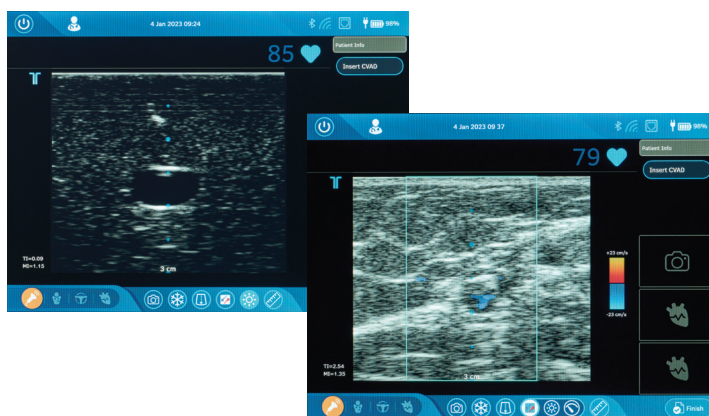

Herramienta de relación catéter-vaso²

La herramienta CVR ayuda al profesional clínico a elegir el catéter de tamaño French adecuado. Las directrices del INS establecen que un catéter con un diámetro inferior al 45 % garantiza la seguridad del paciente al proteger la vasculatura de una oclusión excesiva.³

- Coloque fácilmente el círculo de medición sobre el vaso y ajústelo para que coincida con el tamaño del vaso en incrementos de 0,5 mm
- Utilice el +/- azul para introducir el diámetro interior del vaso
- Utilice el +/- naranja para introducir el tamaño French del catéter
- La relación se calcula automáticamente en diámetro y área

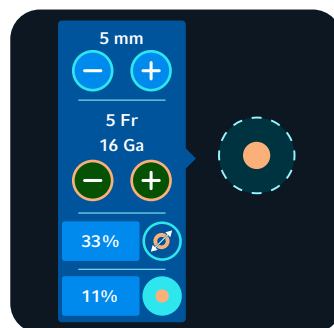

Referencias:

1. ADHX-001612: Índice de archivos del historial de diseño del sistema DLX VPS Rhythm™.
2. RHY-200-OPM-US: Manual del operador del DLX VPS Rhythm™.
3. Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. J Infus Nurs. 2021;44(1S Suppl 1):S1-S224.

Por restricciones de la legislación federal (de Estados Unidos), la venta de estos dispositivos solo puede ser realizada por médicos o bajo prescripción facultativa.

Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Para obtener información de productos, póngase en contacto con la.cs@teleflex.com o con su representante local. Consulte las respectivas instrucciones de uso para conocer las indicaciones aprobadas en su zona geográfica. Verifique el estado de aprobación en su normativa local.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Arrow y VPS Rhythm son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales en los EE. UU. u otros países. La información incluida en este material no sustituye las instrucciones de uso del producto. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local.

Revisado: 12/2024 © 2024 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-010356 LA ES-LA