


Cateter Balão para PTCA Chocolate XD[®]

Design Previsível

Cateter Balão para PTCA Chocolate XD®

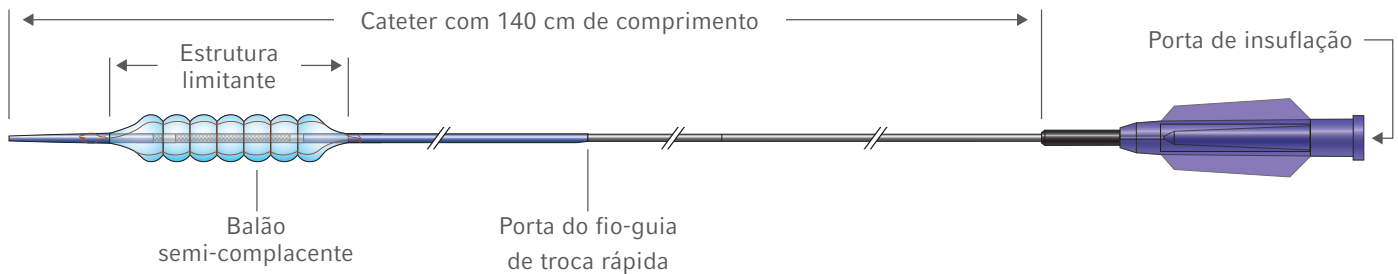

Informações Sobre Produto

Cateter Balão para PTCA Chocolate XD®

O Cateter de Dilatação por Balão para PTCA Chocolate XD® é indicado para dilatação por balão da porção estenótica de artéria coronária ou de estenose do bypass para melhoria da perfusão do miocárdio, incluindo reestenose intra-stent. O Cateter de Dilatação por Balão para PTCA Chocolate XD® é contraindicado para artéria coronária principal esquerda desprotegida, espasmo da artéria coronária na ausência de estenose significativa e passagem pelas escoras do stent.


| NÚMERO DO CATÁLOGO | COMPATIBILIDADE COM FIOS-GUIA | COMPRIMENTO DO CATETER | DIÂMETRO DO BALÃO | PERFIL DE CRUZAMENTO* | COMPRIMENTO DO BALÃO | PRESSÃO NOMINAL | PRESSÃO DE RUPTURA NOMINAL | COMPATIBILIDADE COM CATETER-GUIA |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| CX14-140-2010 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 2.0 mm | 1.00 mm (0.039 pol.) | 10 mm | 10 atm | 16 atm | 5 Fr. |
| CX14-140-2015 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 2.0 mm | 1.00 mm (0.039 pol.) | 15 mm | 10 atm | 16 atm | 5 Fr. |
| CX14-140-2020 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 2.0 mm | 1.00 mm (0.039 pol.) | 20 mm | 10 atm | 16 atm | 5 Fr. |
| CX14-140-2510 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 2.5 mm | 1.02 mm (0.040 pol.) | 10 mm | 10 atm | 16 atm | 5 Fr. |
| CX14-140-2515 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 2.5 mm | 1.02 mm (0.040 pol.) | 15 mm | 10 atm | 16 atm | 5 Fr. |
| CX14-140-2520 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 2.5 mm | 1.02 mm (0.040 pol.) | 20 mm | 10 atm | 16 atm | 5 Fr. |
| CX14-140-3010 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 3.0 mm | 1.07 mm (0.042 pol.) | 10 mm | 10 atm | 16 atm | 6 Fr. |
| CX14-140-3015 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 3.0 mm | 1.07 mm (0.042 pol.) | 15 mm | 10 atm | 16 atm | 6 Fr. |
| CX14-140-3020 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 3.0 mm | 1.07 mm (0.042 pol.) | 20 mm | 10 atm | 16 atm | 6 Fr. |
| CX14-140-3510 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 3.5 mm | 1.08 mm (0.043 pol.) | 10 mm | 10 atm | 16 atm | 6 Fr. |
| CX14-140-3515 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 3.5 mm | 1.08 mm (0.043 pol.) | 15 mm | 10 atm | 16 atm | 6 Fr. |
| CX14-140-3520 RX | 0.014 pol. | 0.36 mm | 3.5 mm | 1.08 mm (0.043 pol.) | 20 mm | 10 atm | 16 atm | 6 Fr. |

Embalado em quantidades de uma unidade por caixa.

*O perfil de cruzamento é definido como o diâmetro máximo encontrado entre a extremidade proximal do balão e a ponta distal do cateter. Os números acima representam o perfil médio de cruzamento (N = 15 unidades) de cada diâmetro do Cateter Balão para PTCA Chocolate XD®.


Exceda Suas Expectativas

O Cateter Balão para PTCA Chocolate XD® apresenta uma estrutura limitante de nitinol única, concebida para expandir com uniformidade a fim de diminuir o estresse na parede do vaso e reduzir o risco de dissecação. Exceda suas expectativas com um cateter produzido para proporcionar uma diluição previsível e atraumática.

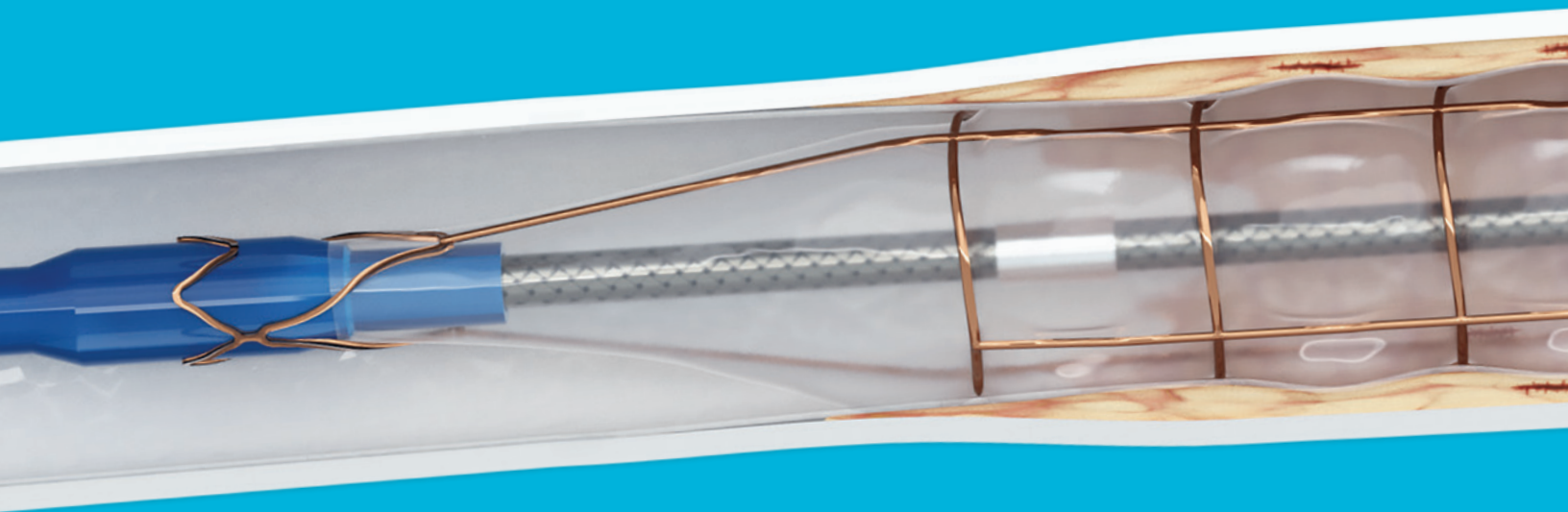

Projetado para dilatação controlada

A estrutura limitante de nitinol foi projetada para facilitar a expansão uniforme e atraumática do balão.

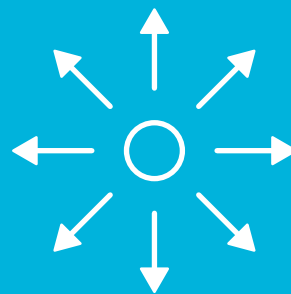

Projetado para diminuir traumas na parede do vaso


As “estrias” foram concebidas para aliviar o estresse, enquanto as “almofadas” foram feitas para fornecer forças de dilatação multifocais destinadas a reduzir os efeitos da angioplastia traumática.

“Almofadas”

“Estrias”




Cateter Chocolate XD® insuflado

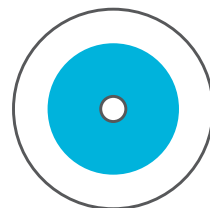

Cateter Chocolate XD® deflacionado que preserva sua respectiva forma, proporcionando um perfil secundário melhorado



Balão para POBA insuflado

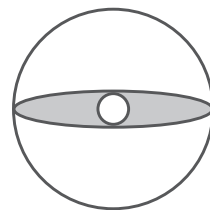


Formato arredondado (abas) deflacionado para angioplastia com balão (POBA) que resulta em um perfil secundário grande

Projetadas para reduzir o efeito “dog bone”

A estrutura limitante de nitinol foi projetada para incentivar a insuflação sincronizada de comprimento total, evitando a expansão excessiva nas bordas da lesão.



Balão para PTCA Chocolate XD® PTCA


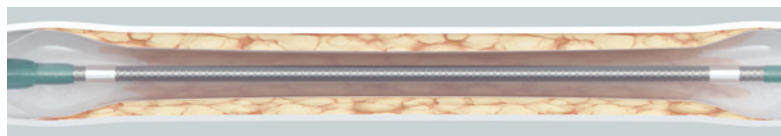


Balão para PTCA padrão

Projetado para uma excelente preparação dos vasos

O Cateter Balão para PTCA Chocolate XD® em combinação com ultrassom intravascular (IVUS) e aterectomia orbital (OA) facilita a entrega e a expansão ideal do stent, resultando em uma grande área de atuação do stent nas lesões (MSA) em lesões coronarianas severamente calcificadas.¹

1. Desai R, Mirza O, Martinsen BJ, et al. Plaque modification of severely calcified coronary lesions via orbital atherectomy: single center observations from a complex Veterans Affairs cohort. *Health Sci Rep.* 2018;1:e99.

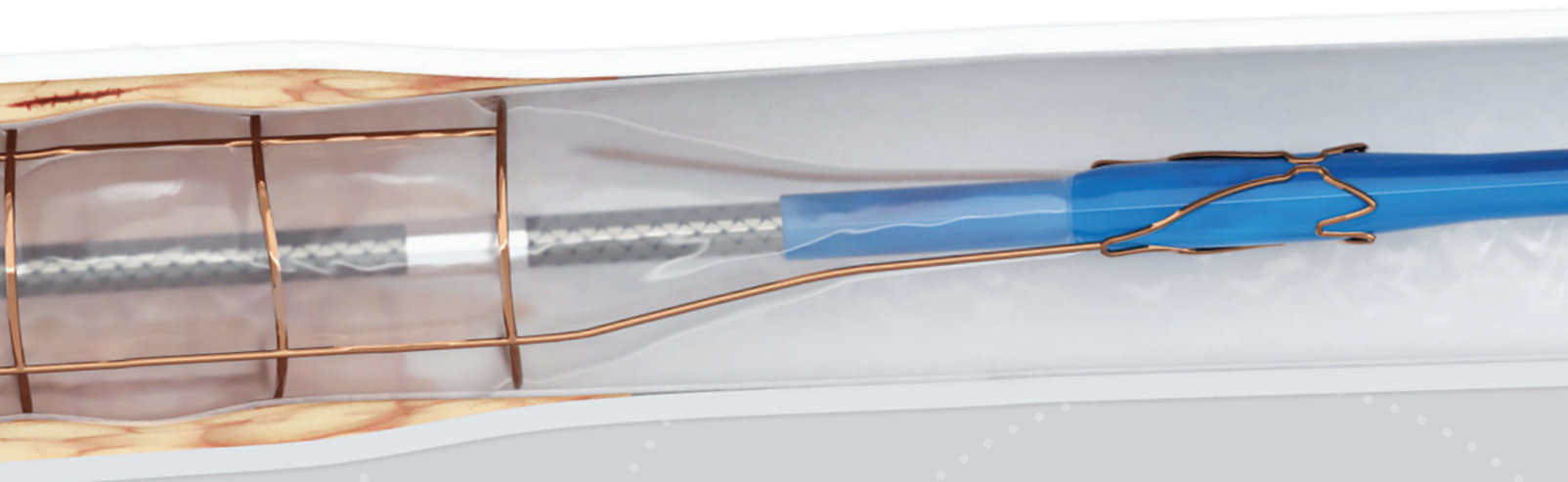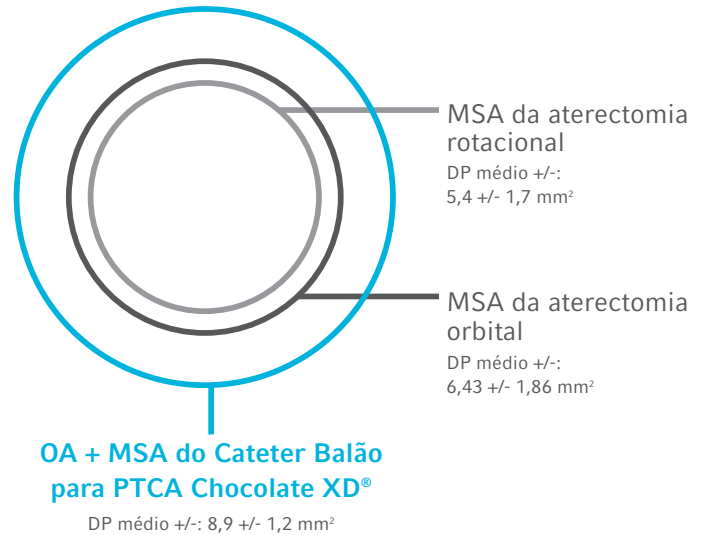

Aumente Suas Opções de Tratamento

O Cateter Balão para PTCA Chocolate XD® foi projetado para oferecer uma alternativa menos traumática à angioplastia com balão convencional. Além de inflar uniformemente para diminuir o estresse na parede do vaso, ele pode aumentar as opções de tratamento em situações em que o stent não pode ser utilizado:



Pacientes que não podem se submeter à terapia dupla antiagregação plaquetária




Ramos laterais



Vasos pequenos ou distais



Lesões ostiais

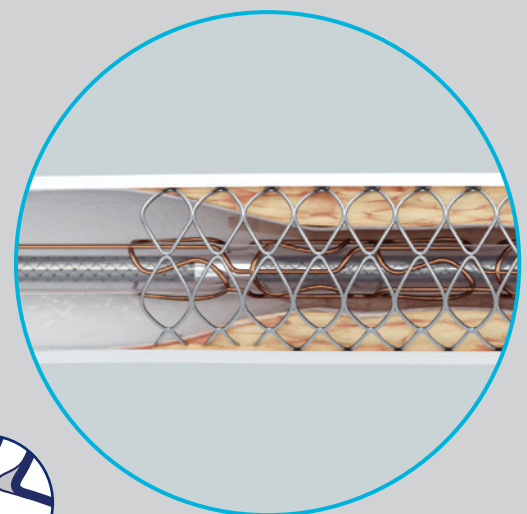

Reestenose intra-stent

A Teleflex é um fornecedor global de tecnologias médicas projetadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Aplicamos a inovação motivada por objetivos — uma busca incansável pela identificação das necessidades clínicas não atendidas — para beneficiar pacientes e profissionais da saúde. Nosso portfólio é diversificado, com soluções em acesso vascular e intervencional, cirurgia, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo compartilham a visão de que o que nós fazemos todos os dias faz a diferença. Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

A Teleflex é proprietária da Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsç® e Weck® — marcas confiáveis unidas por um objetivo em comum.

Sede Corporativa

Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA

Delegações Regionais

Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, ligação gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA **Internacional:** Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

África do Sul +27 (0)11 807 4887

Alemanha +49 (0)7151 406 0

Austrália 1300 360 226

Áustria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)800 387 9699

China (Pequim) +86 (0)10 6418 5699

China (Xangai) +86 (0)21 6163 0965

Coreia +82 2 536 7550

Espanha +34 918 300 451

França +33 (0)5 62 18 79 40

Grécia +30 210 67 77 717

Índia +91 (0)44 2836 5040

Itália +39 0362 58911

Japão +81 (0)3 6632 3600

México +52 55 5002 3500

Nova Zelândia 0800 601 100

Países Baixos +31 (0)88 00 215 00

Polônia +48 22 4624032

Portugal +351 22 541 90 85

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

República Eslovaca +421 (0)3377 254 28

República Tcheca +420 (0)495 759 111

Singapura (venda indireta para outros países do sudeste asiático) +65 6439 3000

Suíça +41 (0)31 818 40 90

Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

Confira as Instruções de Uso para ver a lista completa de indicações, contraindicações, advertências e precauções. CUIDADO: as leis federais dos EUA restringem a venda desse dispositivo a médicos ou com solicitação médica.

Chocolate XD é uma marca comercial registrada da TriReme Medical LLC.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsç e Weck são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

As informações contidas neste documento não são um substituto para as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Revisado: 07/2019.

© 2019 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-005667 LA PT