



Ultrassom do dispositivo VPS Rhythm™ DLX Device Ultrasound

Colocação de PICC para quem **não gosta de surpresas**


Ultrassom do dispositivo VPS Rhythm™ DLX Arrow™

Visualização para posicionamento direcionado

Uma boa avaliação do vaso é essencial para garantir o sucesso da inserção do PICC, bem como o conforto e a segurança do paciente. Para isso, é necessário um ultrassom claro para o planejamento da inserção e da orientação da agulha. O dispositivo VPS Rhythm™ DLX com ultrassom integrado foi projetado para ser uma ferramenta de avaliação de vasos clara e fácil de usar.

O modo ultrassom do dispositivo VPS Rhythm™ DLX permite ao usuário¹:


- Congelar ou descongelar a imagem
- Tirar uma foto
- Obter medições de diâmetro e área com a ferramenta de relação cateter-vaso (CVR)
- Visualizar indicadores qualitativos do fluxo e da direção do fluido com o modo de mapeamento de fluxo de cores
- Usar um suporte de guia de agulha opcional
- Usar os botões de congelamento e tirar foto diretamente na sonda

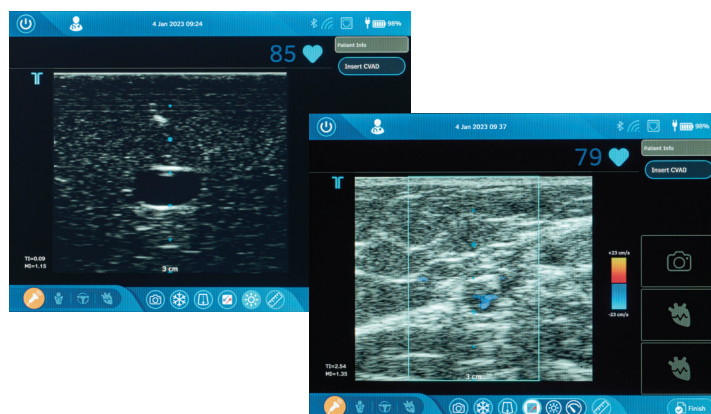

Ferramenta de relação cateter-vaso²

A ferramenta CVR ajuda o médico a escolher o cateter de tamanho French (Fr) adequado. As diretrizes INS afirmam que um cateter com diâmetro inferior a 45% garante a segurança do paciente, protegendo a vasculatura de oclusão excessiva³

- Posicione facilmente o círculo de medição sobre o vaso e ajuste-o para corresponder ao tamanho do vaso em incrementos de 0,5 mm
- Use +/- azul para inserir o diâmetro interno do vaso
- Use +/- laranja para inserir o cateter de tamanho French (Fr)
- A proporção é calculada automaticamente em diâmetro e área

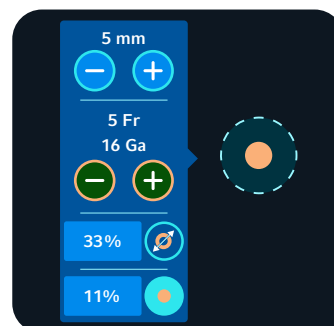

Referências:

1. ADHX-001612: Índice de arquivo de histórico de design para o sistema VPS Rhythm™ DLX.
2. RHY-200-OPM-US: Manual do usuário do VPS Rhythm™ DLX.
3. Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. J Infus Nurs. 2021;44(1S Suppl 1):S1-S224.

A Lei Federal (dos EUA) restringe a venda desses dispositivos por um médico ou a pedido de um médico.

É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Para obter informações sobre o produto, entre em contato através do e-mail la.cs@teleflex.com ou contate seu representante local.

Consulte as instruções de uso aplicáveis para obter as indicações aprovadas na sua região. Consulte o status da aprovação regulatória local.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow e VPS Rhythm são marcas comerciais ou marcas registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas, nos EUA e/ou em outros países.

As informações contidas neste material não substituem as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local.

Revisado em: 12/2024. © 2024 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-010356 LA PT-BR